

# BRUKSANVISNING

Läs igenom hela denna dokumentation innan du använder ditt Eloflex-tillbehör för att vara säker på att du använder den på ett sätt som är riskfritt, och som inte skadar dig, din omgivning eller din elrullstol.



**Eloflex  
W**

**EL&FLEX**

# Tack och lycka till!

---

Tack för att du valt en Eloflex som ditt hjälpmedel. Det betyder mycket för oss eftersom vår vision är att göra människors vardag lite enklare och att ge människor med rörelsehinder en större frihet. Vi hoppas att du upplever båda med hjälp av din Eloflex.

Vi tror att du kommer att få mycket glädje av ditt nya tillbehör till din elrullstol. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om styrhandtaget modell W. Vi uppmanar dig att läsa igenom hela denna dokumentation innan du använder detta tillbehör till din Eloflex för första gången. Vi föreslår också att du tränar på att köra styrhandtaget till din Eloflex på en avskild, öppen och plan yta innan du använder den i andra sammanhang.

Eloflex elrullstol är konstruerad för användare med många olika behov. Beslut huruvida Eloflex är lämpliga för användaren tas alltid av ordnatören eller återförsäljaren tillsammans med användaren själv. Eloflex påtar sig inget ansvar för fall där elrullstolen och dess tillbehör inte är anpassade efter brukarens behov.

En Eloflex och dess tillbehör skall i första hand användas i sitt standardutförande. Om elrullstolen eller dess tillbehör måste anpassas eller förändras på något sätt får det endast utföras av din hjälpmedelscentral eller av Eloflex. Observera att skador och fel som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följts eller på grund av dåligt underhåll omfattas ej av garantin.

*Lycka till och mycket glädje med din Eloflex.*

**Kör försiktigt!**



| Innehåll               | Sidan |
|------------------------|-------|
| Avsedd användning      | 3     |
| Montering              | 4-5   |
| Kallibrera             | 6     |
| Laddningsinstruktioner | 6     |
| Använda styrhandtaget  | 7     |
| Kontakt                | 8     |

# Avsedd användning

## Typklassificering och avsedd användning

Eloflex elrullstolar och dess tillbehör har utvecklats för personer som har svårt för att gå eller inte kan gå alls, men som har synförmåga, kroppslig förmåga och mental förmåga att styra en elrullstol.

Eloflex elrullstolar är tillräckligt kompakta och smidiga för inomhusbruk, men stolarna och dess tillbehör är även lämpliga att använda utomhus.

Eloflex produkter har genomgått olika tester exempelvis EN12184:2014 - klass B, ISO-7176, IEC60601 och batterierna är godkända enligt UN38.3. För mer information läs respektive elrullstols bruksanvisning.

Eloflex elrullstolar uppfyller tillämpliga krav i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt i föreskrifterna (LVFS 2003:11 och LVFS 222009:18) om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv om medicintekniska produkter, 93/42/EEG och 22007/47/EG.

Överensstämmelsebedömning/CE-märkning enligt klass 1 har utfärdats i enlighet med det medicintekniska direktivet 93/42 EEG / MPG (medicintekniska produkter lag) och gäller endast den kompletta produkten. CE-märkningen blir ogiltig om man använder utbyteskomponenter eller tillbehör som inte har godkänts för denna produkt.

## Behov

Syftet med en Eloflex elrullstol är att kompensera en skada eller ett funktionshinder, varför den rekommenderas under följande omständigheter:

- Om användaren har oförmåga att gå eller starkt begränsad förmåga att gå, vilket gör det svårt att förflytta sig i den egna bostaden.
- Om det finns behov av att lämna bostaden för att komma ut i friska luften eller för att besöka de ställen som normalt sett besöks för att vardagsärenden skall utföras.
- När användaren har svårt att ta sig till, eller utföra arbete eller aktiviteter på grund av sitt rörelsehinder.

Det är lämpligt att använda Eloflex elrullstolar och dess tillbehör både inom- och utomhus.

## Bruksanvisning elrullstol

Läs alltid igenom bruksanvisningen till din elrullstol innan du använder detta tillbehör. Där finner du viktig information om säkerhet, användning och skötsel.

## Användbarhet

Använd endast Eloflex elrullstol och dess tillbehör när den är i fullt funktionellt skick. Annars försätter du dig själv och andra i risk. Kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om du upptäcker skada på din Eloflex elrullstol eller dess tillbehör.

## Garanti

Du har ett års garanti på tillbehör till din elrullstol från Eloflex. Garantivillkoren är i linje med de gällande nationella och generella affärsvillkoren och lagarna. De detaljerade garantivillkoren kan laddas ned på [www.eloflex.se](http://www.eloflex.se).



# Montering

Det intuitiva vårdarstyrmingshandtaget passar på alla elrullstolar från Eloflex med serienummer EL161400 eller högre (sålda efter april 2018).

Om din Eloflex har en joystick som ser ut som den på bilden kommer vårdarstyrmingshandtaget att fungera.



## Lossa kabeln

### Steg 1

Börja med att skruva isär kontakten vid joysticken under armstödet.



### Steg 2

Ta bort joysticken och förvara den hemma eller i väskan under sitsen beroende på vilken Eloflex-modell du har.



### Steg 3

Klipp av eventuella buntband längst in på armstödet för att frigöra kabeln.



# Montering

## Montera fästet

Montera vårdarhandtagets fästen på respektive sida av elrullstolens ryggstöd i enlighet med bilderna.

### Steg 1

Öppna fästet genom att skruva ut ratten.

1



2



### Steg 2

Sätt fästet på plats på respektive sida med ratten snett bakåt och skruva åt löst.

3



### Steg 3

Sätt in bågen i respektive fäste och dra åt rattarna.

## Montera styrhandtaget

### Steg 1

Öppna klämman på handtagets baksida. Håll handtaget under bågen och stäng klämman runt röret.

1



2



### Steg 2

Dra åt skruvspaken på klämman löst.

### Steg 3

Vinkla upp styrhandtaget till vågrätt position och dra sedan åt skruvspaken hårt

3



4



### Steg 4

Montera ihop kabeln med styrhandtagets kontakt.

**VIKTIGT!** Var försiktig så att stiften i kontakten inte böjs.

# Kalibrera handtaget

Efter att man monterat och kopplat in handtaget samt vinklat det i vågrät position skall man kalibrera handtaget.

Håll in det gula säkerhetsgreppet på handtaget (1) samtidigt som ni trycker på startknappen (2), lampan på snigelknappen (3) börjar nu blinka långsamt. Fortsätt hålla in säkerhetsgreppet tills den lilla gröna lampan på snigelknappen börjar blinka snabbt. Släpp då säkerhetsgreppet på handtaget och vänta tills lampan slutar blinka.

Nu är handtaget kalibrerat och redo att användas.



# Laddningsinstruktion

## Så här laddar du:

Börja med att stänga av din Eloflex (alla lampor på styrhandtaget skall vara släckta).

Koppla in laddaren i uttaget på styrhandtaget (du finner det under körhandtaget). Var noga med att kontakternas position stämmer överens med varandra. Sätt därefter in laddarens elkabel i ett vägguttag.

Laddning indikeras med en lampa på laddaren. Röd lampa betyder att laddning pågår. Efter cirka tre timmar är batterierna laddade till 90 procent. Stolen kan nu användas igen.

Efter cirka 5-8 timmar blir lampan på laddaren grön och batterierna är fullt laddade. Under laddningen blir själva laddaren varm, och detta är helt normalt. För maximal livslängd på batterierna bör laddning ske i cirka fem timmar och vi rekommenderar att du kopplar ur laddaren när batterierna är fulladdade.



**VIKTIGT!**

**Koppla  
ALDRIG  
in laddaren  
direkt  
i batteriet.**

När flera av lamporna på batteriindikatorn på styrhandtaget har slocknat och endast en röd och en gul lyser bör du ladda. Batterierna tar dock inte skada av att laddas ofta så du kan ladda även när fler lampor på batteriindikatorn lyser.

Laddning av batterierna kan ske ner till -10 grader. Vid laddning i lägre temperaturer blir batterierna inte fulladdade. Om din Eloflex används i minusgrader påverkas körsträckan. Vid exempelvis -10 grader kan körsträckan minska med upp till 50%.




# Använda styrhandtaget

**På och av:** Starta din Eloflex med knappen på styrhandtaget. När stolen inte används stänger man av med strömbrytaren på styrhandtaget

**Snigelhastighet:** Vi rekommenderar att man kopplar ur snigelhastigheten genom att trycka på snigel-knappen så att lampan slocknar.

**Säkerhetsgreppet:** Tryck in det gula säkerhetsgreppet (död mans grepp) med en eller två händer och börja sedan gå framåt. Stolen kommer nu att följa rörelserna från den som håller i handtaget. Om man släpper säkerhetsgreppet stannar stolen omgående.

**Tryck löst:** Tänk på att bara hålla lätt i handtaget. Den som håller i handtaget skall inte putta stolen utan endast styra den. Det är stolens motorer som skall göra jobbet. Ingen kraft behövs alltså för att stolen skall följa rörelserna från den som håller i styrhandtaget.

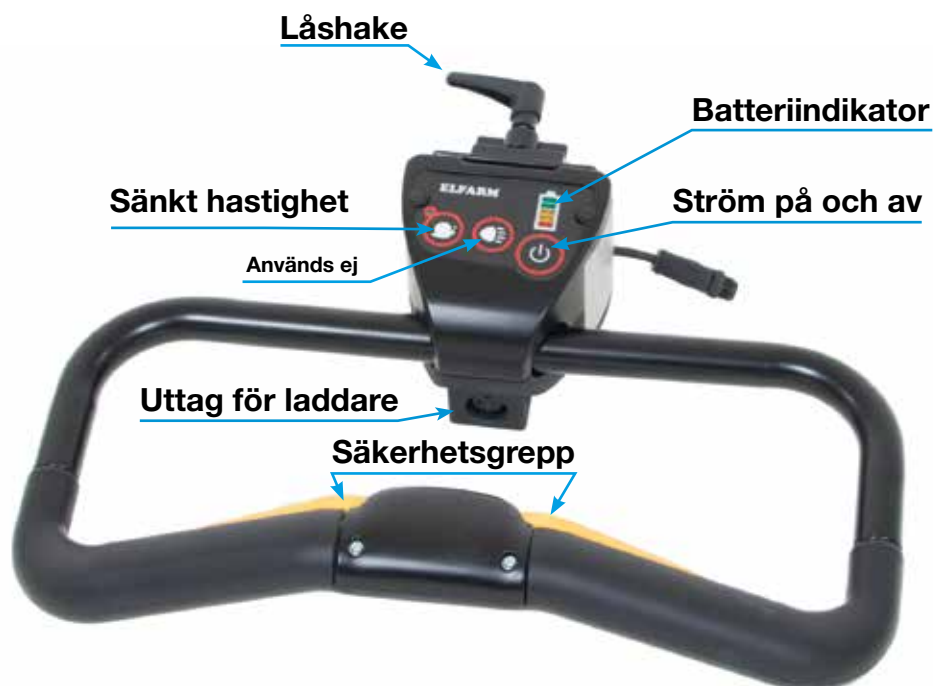

**Svänga:** Gå åt vänster eller höger om du vill svänga så följer stolen med.

**Hastighet:** Gå snabbare eller långsammare så anpassar stolen sin hastighet efter den som håller i handtaget.

**Backa:** Om du vill backa stolen går du bakåt samtidigt som du drar handtaget lätt bakåt.

**Bromsfunktion:** Om du går nerför bromsar stolen automatiskt så att den håller samma hastighet som den som går bakom.

## Temperaturkompensering

Handtaget har inbyggd kompensation för temperaturskillnader vilket innebär att det själv kompenserar för stora temperaturvariationer. Om handtaget trots det inte beter sig som det skall vid stor el-

ler snabb temperaturvariation (om man kommer från mycket kallt ute till varmt inne) kan man behöva kalibrera om styrhandtaget enligt stycket på sidan 6.



### VIKTIGT!

Man får absolut inte använda styrhandtaget som körhandtag när stolen är avstängd.

Man får alltså inte putta stolen med hjälp av styrhandtaget när den är frikopplad

Om du skall checka in din Eloflex på flyget måste du först ta bort ditt styrhandtag och lägga det i resväskan.

## © Copyright Eloflex

Detta dokument innehåller upphovsrättsligt skyddad information och den får varken delvis eller helt kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd från Eloflex.

Eloflex reserveras sig för eventuella skrivfel i detta dokument och vi förbehåller oss rätten till produktändringar.

## Kontakta Eloflex

Om du har frågor eller behöver hjälp ber vi dig i första hand kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Om du vill ha direktkontakt med oss finner du kontaktinformation på vår hemsida, [www.eloflex.se](http://www.eloflex.se) På hemsidan finns också en specifik supportsida där du bland annat hittar vanliga frågor och svar. Adressen är [www.eloflex.se/faq](http://www.eloflex.se/faq)



**Eloflex**  
**Hammarbacken 4b**  
**191 49 Sollentuna**

**Telefon: 010-18 33 100**  
**E-post: [info@eloflex.se](mailto:info@eloflex.se)**  
**Webb: [www.eloflex.se](http://www.eloflex.se)**

**OBS!** Kontakta alltid Eloflex för att boka tid före ett eventuellt besök.