

Instruktion Airpad



Airpad är en enkammardyna som är luftfylld. Lufttrycket regleras utan pump. Kombinationen av lämpligt lufttryck och viscoelastiskt skum ger en god sittkomfort. Dynan kan användas både i rullstol och på stolar. För bästa sittkomfort ska det vara 1,5 cm – 2 cm avstånd mellan dynans undersida och den lägsta punkten på brukarens kropp (vanligen sittbenet). Tänk på att dynans överdrag ska vara slätt.

Airpad bör inte användas tillsammans med andra dynor eller överdrag. Dynan anpassas för brukaren genom justering till lämpligt lufttryck i dynan. Sittställningen stabiliseras av det viskoelastiska skummet i dynan.

På undersidan är dynan grå med antiglidfunktion. Den gråa sidan ska ligga nedåt vid användning. Var noga med att ventilen ska vara fri.

Brukarvikt Minimum 30 kg
Max brukarvikt 150 kg.

Att använda AIRpad



Lägg AIRpad på ett plant underlag med den gråsidan neråt. Kontrollera att ventilen sticker ut i överdraget. Öppna ventilen genom att vrida den till höger. Det finns två lägen i ventilen. Första gången AIRpad ska fyllas med luft vrids ventilen till läge 2. Nu fylls dynan automatiskt. När dynan är full med luft vrids ventilen till vänster så att det vita strecket på ventilen möter den vita punkten. Känn på dynan så att trycket är behagligt.



Om dynan har för mycket luft vrid ventilen åt höger till läge 1.



Känn på dynan så att trycket är lämpligt. Vrid ventilen till vänster så att det vita strecket på ventilen möter den vita punkten.

Ta av och sätt på överdrag:



Ta av; Öppna ventilen och släpp ut litet luft ur dynan. Öppna blixtlåset och ta ut dynan ur överdraget.

Sätt på; Öppna ventilen i läge ett och släpp ut lite luft. Öppna överdraget i blixtlåset. Lägg dynan i överdraget. Börja med ventilsidan. Tillse att ventilen ligger på plats i öppningen på överdraget. Fortsätt med den övriga dynan. Dynans grå sida ska ligga nedåt precis som överdragets grå sida. Stäng blixtlåset så att låset ligger i sin ficka på överdraget. Öppna ventilen och fyll dynan.

Rengöring och underhåll.

Stäng ventilen. Ventilen är stängd när strecket på ventilen möter punkten på ventilen. Dynan rengöres med ett mildt rengöringsmedel och desinficeras.

Överdraget kan tvättas i maskin på 60 grader. Använd inte antistatmedel. Tvättmärkning finns på överdragets insida.

Kontrollera en gång per vecka ventilens funktion genom att tömma dynan och återfylla den. Om möjligt låt dynan vara utan luft en natt vid detta tillfälle.

Använd inte dyna eller överdrag tillsammans med andra dynor och överdrag. Dynan pumpar upp sig själv. Använd inte pump.

Dynan ska inte ligga i direkt solljus för länge. Den ska heller inte utsättas för extremt höga temperaturer.

Dynan får inte utsättas för vassa föremål. Detta kan skada luftkammaren. Bär inte dynan i ventilen. Stäng ventilen när dynan rengöres.