


Så här byter du sida på joysticken:



1 Ta bort joysticken genom att lossa skruven under armstödet.

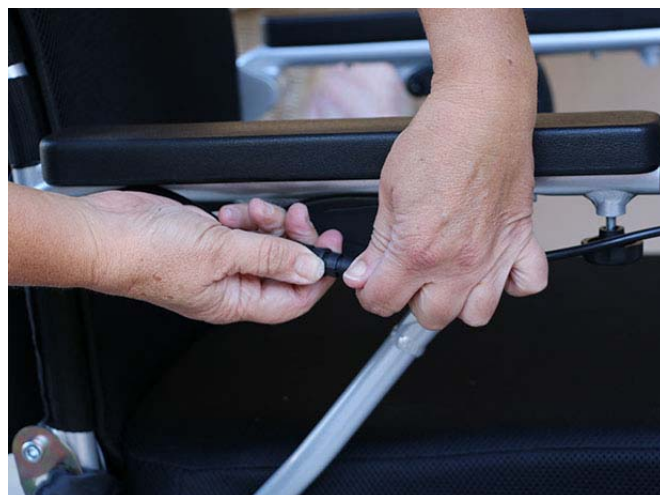


2 Lossa de två låsringarna på joystick-kontakten och dra sedan försiktigt isär kontakten.




3 Klipp av buntbandet under armstödet med en avbitartång. OBS! Akta kabeln.



4 Lossa rygglädseln genom att dra det utåt och uppåt (det sitter fast med kardborre).

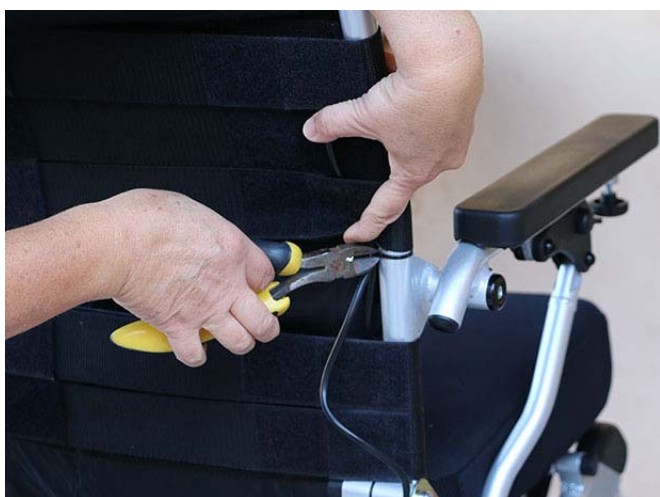

5 Klipp av buntbandet på höger ryggstolpe med hjälp av en avbitartång. Obs igen, akta kabeln.

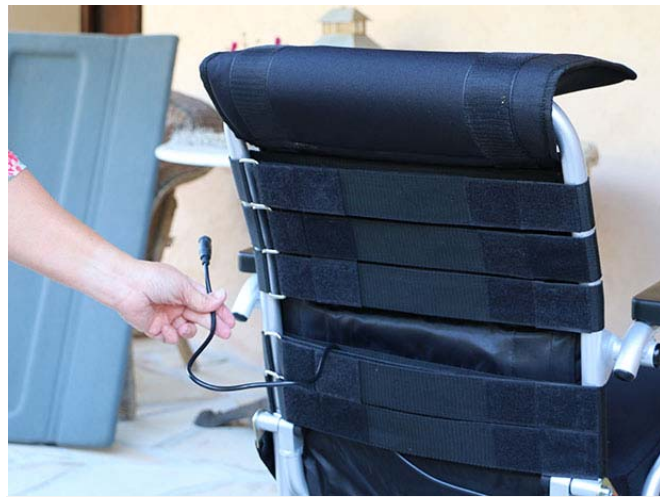

6 Dra ut kabeln till vänster om ryggstödet. Om du upplever att kabeln är för lång kan du linda den ett varv runt något av ryggstödsbandet. **VÄND →**



7 Sätt fast sladden under vänster armstöd med ett buntband. Vänta med att dra åt.



8 Ta ur plastgluggen ur vänster armstödsrör och flytta den till andra sidan.



9 Ta loss fästskruven ur höger armstöd och flytta den till vänster sida.



10 Sätt i joysticken, koppla ihop kabeln och justera sedan längden enligt bilden. Dra därefter åt buntbandet och klipp av det.



11 Du är nu redo att köra din Eloflex med joysticken monterad på vänster sida.