

Så här monterar du nackstöd:



1 Lossa ryggstödsstyget genom att dra i underkant och fäll det sedan framåt.



2 Lossa det övre kardborrebandet för ryggstödet. Montera sedan vänster fäste.



3 Se till att fästet monterats över tyget på ryggstödsstolpen. Dra sedan lätt åt skruvarna.



4 Montera höger fäste enligt bilden. Det skall sitta över tyget. Drag åt skruvarna lätt.



5 Skjut in vänster fästbåge. Hålet på bågen skall peka bakåt. Drag åt skruvarna ytterligare.



6 Montera höger fästbåge. Hålet skall peka bakåt. Drag åt skruvarna på fästet ytterligare.



7 Spänn åter fast det övre kardborrebandet i ryggstödet. Höger fäste kommer att vrida sig men detta justeras senare.



8 Sätt tillbaka ryggstödsstyget och fäst det med kardborrelåset.



9 Montera mittensektionen genom att skuta det underifrån över fästbågarna. Sätt fast det med hjälp av låsklämmorna.



10 Fixera mittensektionen med hjälp av låsrattarna. Se till att båda fästbågarna pekar rakt bakåt när du skruvar åt låsrattarna.



11 Montera nackstödsdelen och ställ in höjden. Lås sedan med låsratten.



12 Justera höjd, vinkel och position med hjälp av de två lederna. Lås fast med de tre fixeringsspakarna.



13 Efterdra de två fästena genom att skruva åt de två skruvarna i respektive fäste.



14 Observera att fästet och fästbågen måste peka rakt bakåt på respektive sida för att stolen skall kunna fällas ihop.