

Ny Joystick från april 2018

Från och med april 2018 får alla kontrollpaneler (joystick, styrspak) på Eloflex ett nytt utseende. Se nedan för förklaring av knapparnas och indikatorernas funktion och betydelse.



1. Batteriindikator

Här indikeras hur mycket ström det finns kvar i batterierna. Batteriindikatorn består av nio gröna lampor. När batterierna är fulladdade lyser samtliga lampor. Allt eftersom batterierna töms slocknar lamporna i tur och ordning. Vi föreslår att du laddar när tre av de nio lamporna återstår.

2. Strömbrytare

Med denna knapp sätter du på och stänger av din Eloflex. Vänta alltid några sekunder innan du kör iväg efter att du satt på din Eloflex. Tänk på att din Eloflex skall vara avstängd när du laddar den.

3. Minska hastigheten

Med hastighetsväljarens minusknapp minskar du maxhastigheten. Vald hastighet indikeras med den gula indikatorn mellan minus och plusknapparna. Det finns fem hastigheter. När en gul lampa lyser står Eloflex i sitt långsammaste läge. När alla fem gula lamporna lyser är Eloflex i sitt snabbaste läge.

4. Öka hastigheten

Med plusknappen ökar du Eloflexens maxhastighet. Se punkt tre ovan.

5. Tuta

Tryck för att påkalla uppmärksamhet

6. Kontrollspak (joystick)

Med denna spak kontrollerar du stolens färdriktning och hastighet. För spaken framåt för att börja köra framåt. För spaken bakåt för att backa och för spaken i sidled för att svänga.